

# HMD - クリップアプライヤ

医療機器届出番号：34B2X10007HMD007


(未滅菌 リユース製品)

“ 片手でクリップの  
把持、位置調整、留置が  
可能なクリップ鉗子です ”



- 片手でクリップの把持、位置調整、留置
- 細かな操作性と脱落防止機能
- 人間工学による使いやすいデザイン

“ 片手でクリップの  
把持、位置調整、留置が  
可能なクリップ鉗子です ”

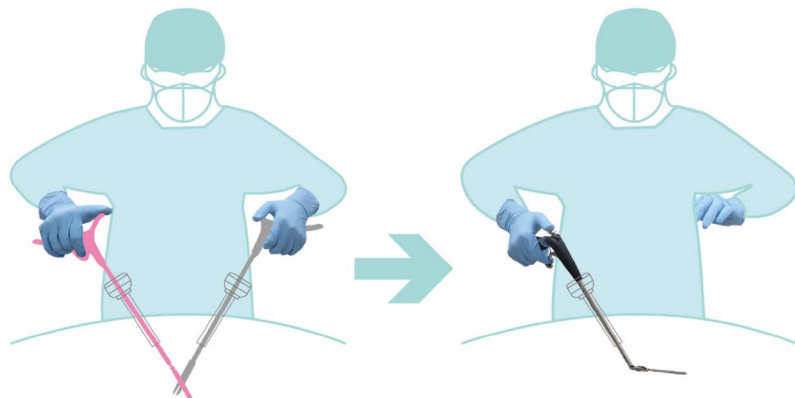

HMD - クリップアプライヤ

片手での操作、位置調節により、手術時間短縮や患者様の負担軽減が見込めます。

使用手順（大腸手術を例に）



①術前準備  
クリップをアプライヤの把持部に取付け、クランプレバーで脱落防止ロックをします。




②施術  
アプライヤをトロカールから挿入、角度調整レバーでクリップの位置を調整し、クランプレバーを握ってクリップを開きます。



③施術  
クランプレバーを押し出すと、クリップが解放され大腸を挟みます。クリップ把持部を真っすぐに戻しアプライヤをトロカールから抜きます。


HMD - クリップアプライヤの特徴

優れた位置合わせ機能

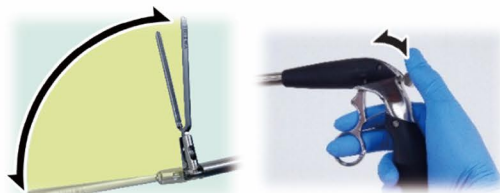


手元のレバーを操作することで、クリップの角度を調整できます。

細かな操作性

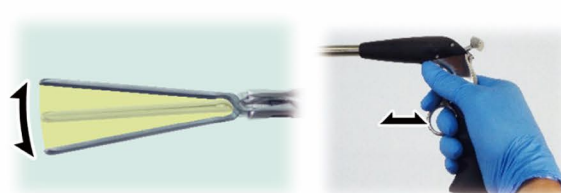

術野に合わせてクランプレバーを操作することで、クリップの開き幅を調整できます。

脱落防止機能

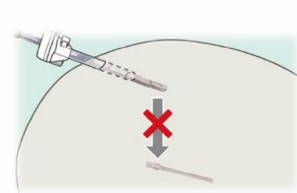

ロック機能により、意図しない操作での体内へのクリップの脱落を防止します。

品番	060
品名	HMD - クリップアプライヤ
包装	1本 / 箱

※適合クリップについて

下記のクリップ以外は適合しませんのでご注意ください。

- (株)平和医療器械 プレミアムドバーキクランプ C65S
- 届出番号 35B2X10001001402



■販売元

HEIWA 株式会社 平和医療器械

〒747-0036 山口県防府市戎町 2-4-37  
電話 0835-22-3658 FAX 0835-22-3678  
URL <http://www.heiwairyu.co.jp/>

■製造販売元

HAMADA 株式会社 ハマダ

〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰 1-9-41  
電話 082-281-6341 FAX 082-285-0531  
URL <http://www.kk-hamada.co.jp/>