



- ① 包装より取り出し、印字面を上(天)の向きにします。 印字面を天の向きにする



トカール等を経由して体腔内に入れる。

②



ゆっくりと押し出します。

③



袋を完全に筒から出します。  
目的の組織等を袋に入れます。

裏につづく

### 4 回収のし方を説明します。



Bをゆっくり引くとリングが収納されます。

手元のUPを上向きにしたとき  
黒キャップが右側にきます

※リングに黒キャップが  
付いていることを  
確認してください



### 5

Bを完全に引き抜きます。  
筒から抜去するとこのようになります。



### 6

ひもを引っ張り巾着を  
閉じます。



最後はそのままトロッカーと一緒に体外に抜くか、またはハサミで糸を切り、筒を抜去してください。

since 1963

株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658

宇部：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP：“平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 3582X10001